



## Gebrauchsanweisung

### Analfissurstift

#### Liebe Anwenderin und Anwender,

bitte lesen Sie die folgende Gebrauchsanweisung aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Medizinproduktes beachten sollten.

Wenden Sie sich bei Fragen bitte an die Tordynex Medical AG.

#### Hersteller:


Tordynex Medical AG  
Windheckenweg 79  
53902 Bad Münstereifel  
Tel.: 02253 / 54 35 95  
Fax: 02253 / 54 35 96  
eMail: Post@Tordynex.com

#### Wozu wird der Analfissurstift angewendet?

Durch wiederholtes und gleichzeitig dauerhaftes (weniger als 60 Minuten!) Einführen des Analfissurstiftes in den Analkanal wird eine Entspannung der verkrampften Schließmuskulatur erreicht, welche nachweislich eine Verbesserung der Elastizität des Analkanals und mithin zu einer beschleunigten Heilung der Fissur führt. Zugleich bewirkt der durch den Analfissurstift auf die Analfissur ausgeübte Druck eine Kompression der Wunde, wodurch etwaige Blutungen erfolgreich gestillt werden können.

#### Wie sollte der Analfissurstift angewendet werden?

Der Analfissurstift sollte durch den Schließmuskel soweit in den Analkanal eingeführt werden, bis die dünnste Stelle (ca. 7mm) des Stiftes vom Schließmuskel umschlossen ist. Treten beim Einführen erhöhte Schmerzen auf, kann der Kopf des Fissurstiftes mit einem Gleitmittel eingerieben werden. Bei der Anwendung empfiehlt sich eine entspannte Körperhaltung, entweder in Hockstellung oder seitlich liegend. Der Analfissurstift darf nicht tiefer in den Analkanal eingeführt werden, als in der Anleitung beschrieben ist, da sonst die Gefahr besteht, dass er in den Darm rutscht!

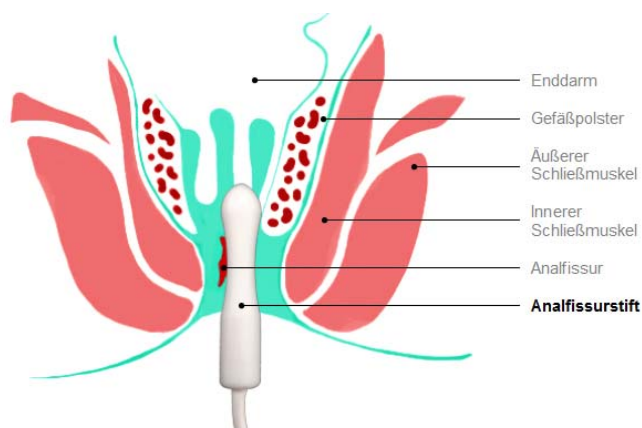

Der Analfissurstift sollte dort weniger als 60 Minuten belassen werden. Der Vorgang kann mehrmals täglich wiederholt werden. In der Regel sind die Analfissuren in wenigen Tagen abgeheilt. Sollten wieder neue Fissuren auftreten, ist der Stift wieder anzuwenden.

Der Erfolg der Behandlung hängt im Wesentlichen von der Regelmäßigkeit der Anwendung ab. Hierzu empfiehlt es sich, zusätzlich nach Einführen des Analfissurstiftes die Schließmuskulatur gegen den Widerstand des Stiftes mehrmals zuzukneifen. Diese Maßnahme kann den Schließmuskel wieder kräftigen.

Nach der Anwendung wird der Analfissurstift an seinem Rückholband herausgezogen.

**Reinigung des Analfissurstiftes:**

Nach Entfernung des Analfissurstiftes sollte dieser mit lauwarmen Wasser und vorzugsweise einer Seifenlösung oder einer milden Waschlotion gereinigt werden. Keine Haushaltsreiniger oder Spülmittel verwenden. Nicht mit chemischen Mitteln reinigen. Anschließend mit klarem Wasser reinspülen und trocknen lassen. Eine Desinfektion ist nicht notwendig. Es ist daher auch nicht erforderlich, den Analfissurstift auszukochen.

**Anwendungshinweise:**

Eine Mehrfachverwendung des Analfissurstiftes bei dem gleichem Nutzer ist möglich.

Vor jeder Anwendung ist der Analfissurstift auf Unversehrtheit und Sauberkeit der Oberfläche zu prüfen. Bei Veränderungen der Oberfläche ist der Analfissurstift durch einen neuen zu ersetzen.

Nach jeder Anwendung ist der Analfissurstift mechanisch mit lauwarmem Wasser und Seifenlösung zu reinigen und anschließend mit klarem Wasser zu spülen.

**Besondere Hinweise:**

Suchen Sie bei Schmerzen, Juckreiz und Blutungen unbedingt Ihren Arzt auf. Gehen Sie jährlich zur Vorsorgeuntersuchung, denn die rechtzeitige Erkennung von Enddarmkrankungen erhöht die Heilungschance.

**Nebenwirkungen:**


Nebenwirkungen sind nicht bekannt!

**Aufbewahrungshinweise**

Medizinprodukt sorgfältig aufbewahren! Vor Kindern sichern!

Inhalt:

1 Analfissurstift (wie abgebildet) mit Rückholband und Gebrauchsanweisung

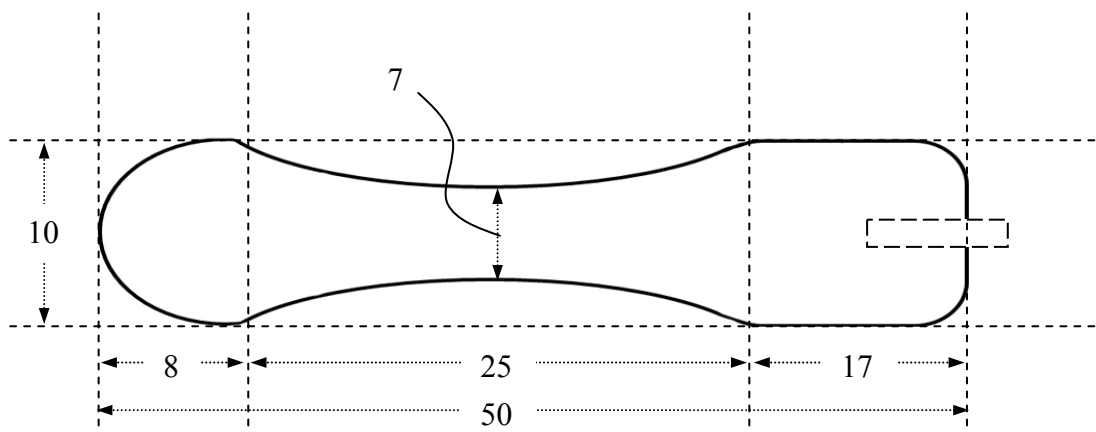

**Stand der Information:** Juli 2017