


Gebrauchsanweisung

analfissur **STIFT**

Tordynex Medical AG 

Medizinprodukt zur Behandlung
von Analfissuren

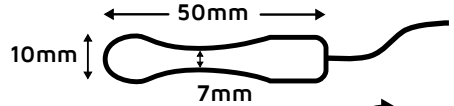

Liebe Anwenderin, lieber Anwender,



bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch.
Sie enthält wichtige Informationen zur Anwendung dieses
Medizinprodukts. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich
bitte an Ihren Arzt, Apotheker oder direkt an uns.

Vielen Dank, dass Sie sich für das Medizinprodukt
Analfissurstift entschieden haben.

Wozu wird der Analfissurstift angewendet?

Indikation und Zweckbestimmung:


Der Analfissurstift ist ein ideales Produkt für eine akute und
dauerhafte Behandlung von Analfissuren. Die besondere
Formgebung und das nicht an Gewebe und Wunden
haftende Material bewirken, dass sich der Schließmuskel
auf eine besonders schonende und schmerzfreie Weise
entspannen und so zur beschleunigten Heilung der
Analfissur beitragen kann. Weiterhin wird durch
den Analfissurstift eine Kompression vorhandener Wunden
erreicht, wodurch etwaige kapillare Blutungen gestillt
werden können.

Einfaches und in der Regel nicht unangenehmes bis kaum spürbares Einführen des Analfissurstiftes in den After aufgrund seines nicht an Gewebe und Wunden anhaftenden, ergonomisch geformten Materials aus Polytetrafluorethylen für <60 Min. pro Anwendung, siehe Abb. 1. Immer wieder anwendbar unter Beachtung der Mindesthaltbarkeitsangabe. Ohne chemische Zusätze, mit Salben kombinierbar.

Wie wird der Analfissurstift angewendet?

Der Analfissurstift sollte durch den Schließmuskel so weit in den Analkanal eingeführt werden, bis die dünnste Stelle (ca. 7mm) des Stiftes vom Schließmuskel umschlossen ist, siehe Abb. 1. Der Analfissurstift darf nicht tiefer in den Analkanal eingeführt werden als in der Anleitung beschrieben ist, da sonst die Gefahr besteht, dass er in den Darm rutscht. Für die Dauer der Anwendung empfiehlt sich eine entspannte Körperhaltung, vorzugsweise seitlich liegend oder sitzend, um den Halt zu unterstützen, siehe Abb. 1. Der Vorgang kann mehrmals täglich wiederholt werden.

Abb. 1:

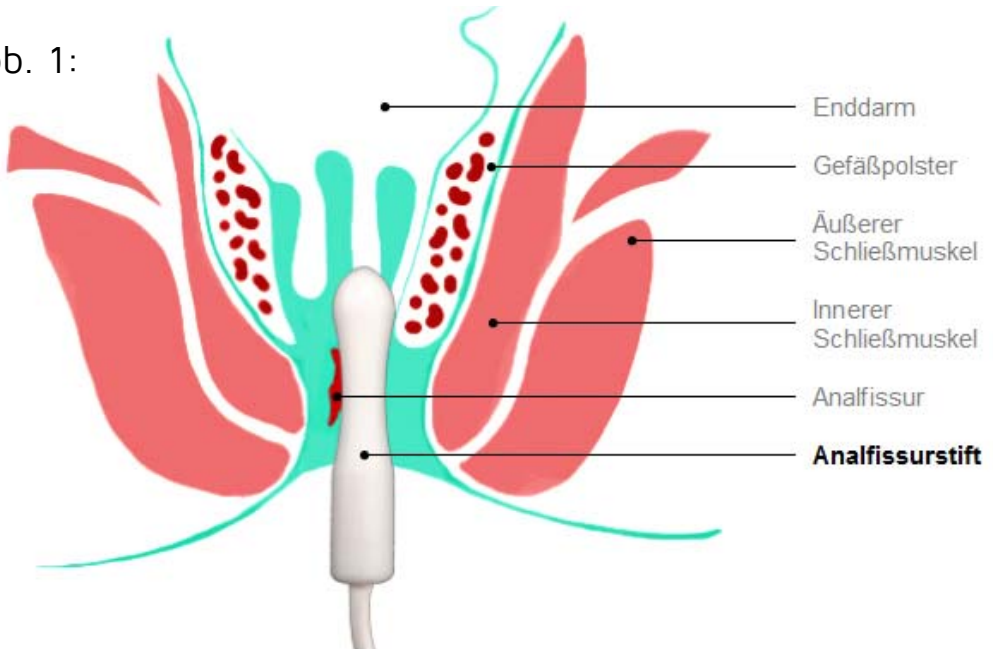

Ist die Anwendung trotz der nicht anhaftenden Form des Analfissurstiftes unangenehm, kann auf die Spitze des Stiftes weniger als eine erbsengroße Portion einer geeigneten Salbe oder eines Gleitgels aufgetragen werden. Verwenden Sie nicht mehr Gleitmittel als nötig, um ein Herausrutschen zu verhindern.

Der Erfolg der Behandlung hängt im Wesentlichen von der Regelmäßigkeit der Anwendung ab. In der Regel können Symptome innerhalb weniger Tage bis Wochen abklingen. Bei starken Beschwerden sollten möglichst ein bis drei Anwendungen (<60 Min. pro Anwendung) an mindestens sieben aufeinanderfolgenden Tagen erfolgen und es empfiehlt sich, den Analfissurstift über mehrere Wochen regelmäßig anzuwenden, was die Wirkungsweise erhöhen und das nachhaltige Abklingen der Symptome fördern kann. Empfehlenswert ist außerdem, nach Einführen des Analfissurstiftes die Schließmuskulatur gegen den Widerstand des Stiftes mehrmals anzuspannen und wieder zu entspannen. Diese Maßnahme kann den Schließmuskel wieder kräftigen. Nach der Anwendung wird der Analfissurstift mit dem Rückholband herausgezogen. Bei erneut auftretenden Beschwerden kann das Produkt wieder angewendet werden.

Hinweise zur Mehrfachanwendung:

Eine Mehrfachverwendung des Analfissurstiftes bei dem gleichen Anwender ist möglich. Vor jeder Anwendung ist der Analfissurstift auf Unversehrtheit und Sauberkeit der Oberfläche zu prüfen. Bei Veränderungen der Oberfläche ist der Analfissurstift durch einen neuen zu ersetzen. Nach Anwendung des Analfissurstiftes sollte dieser mit lauwarmem Wasser und vorzugsweise einer Seifenlösung oder milden Waschlotion gereinigt werden. Nicht mit chemischen Mitteln reinigen und auch keine Haushaltsreiniger oder Spülmittel verwenden. Anschließend mit klarem Wasser reinspülen

und trocknen lassen. Eine Desinfektion oder ein Auskochen ist nicht notwendig.

Besondere Hinweise:

Suchen Sie bei Schmerzen, Juckreiz und Blutungen unbedingt Ihren Arzt auf. Gehen Sie jährlich zur Vorsorgeuntersuchung, denn die rechtzeitige Erkennung von Enddarmkrankungen erhöht die Heilungschance.

Nebenwirkungen:

Die Verwendung des Analfissurstiftes kann in seltenen Fällen ein Brennen im Analbereich verursachen. Weitere Nebenwirkungen sind nicht bekannt.

Gegenanzeigen:

Es sind keine Kontraindikationen und Wechselwirkungen bekannt.

Aufbewahrungshinweise:

Medizinprodukt sorgfältig aufbewahren.
Vor Kindern sichern.

Inhalt:

1 Analfissurstift (wie abgebildet) mit Rückholband und Gebrauchsanweisung.

Vigilanz:

Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle sind der Tordynex Medical AG, Windheckenweg 79, 53902 Bad Münstereifel, Deutschland, telefonisch unter +49 2253 543 595 oder per E-Mail unter post@tordynex.com und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient ansässig ist, zu melden.

Symbolerklärung:



Hersteller

Manufacturer



Verwendbar bis

Use-by date



Chargenbezeichnung

Batch code



Katalognummer

Catalogue number



Land der Herstellung

Country of manufacture



Gebrauchsanweisung
beachten oder
elektronische
Gebrauchsanweisung
beachten

Consult instructions
for use or
consult electronic
instructions
for use



Zur Wiederverwendung
an einem einzelnen
Patienten

Single patient
multiple use



Medizinprodukt

Medical Device



Eindeutige
Produktidentifizierung

Unique device
identifier



CE-Konformitäts-
kennzeichnung

CE Marking of
Conformity



Tordynex Medical AG
Windheckenweg 79, 53902 Bad Münstereifel
Deutschland

Telefon: +49 2253 543 595

Fax: +49 2253 543 596

E-Mail: info@analfissur-stift.de

Internet:

www.analfissur-stift.de

www.tordynex.com

analfissur **STIFT**

Tordynex **Medical AG** 



FST-50/10



Rev.: 2022-07/01

Tordynex **Medical AG** 